



Secuencias de fresado para SWELL™



Fresa 02,0 mm Fresa 02,8 mm Fresa 03,2 mm Fresa 03,6 mm Fresa 04,2 mm Fresa 04,6 mm Fresa 05,2 mm Fresa 05,6 mm

Fresado en huesos Tipo IV (blando)

Ø 3,3 mm	•	•						
Ø 3,75 mm	•	•	•					
Ø 4,2 mm	•	•	•					
Ø 5,0 mm	•	•	•	•	•			
Ø 6,0 mm	•	•	•	•	•	•	•	

En huesos Tipo II y III (moderado y denso)

Ø 3,3 mm	•	•	•					
Ø 3,75 mm	•	•	•					
Ø 4,2 mm	•	•	•	•				
Ø 5,0 mm	•	•	•	•	•	•		
Ø 6,0 mm	•	•	•	•	•	•	•	•

En huesos Tipo I (muy denso)

Ø 3,3 mm	•	•	•					
Ø 3,75 mm	•	•	•	•				
Ø 4,2 mm	•	•	•	•	•			
Ø 5,0 mm	•	•	•	•	•	•		
Ø 6,0 mm	•	•	•	•	•	•	•	•

Nota: solo en zona cortical

Nota: en huesos muy densos podría requerir pasar más de una vez la fresa indicada o bien insinuar la punta de la siguiente fresa en la secuencia. Por su diseño de dos etapas, las fresas de Adin incorporan función avellanadora.

