


# Secuencias de fresado para Touareg-S™ y Touareg-OS™

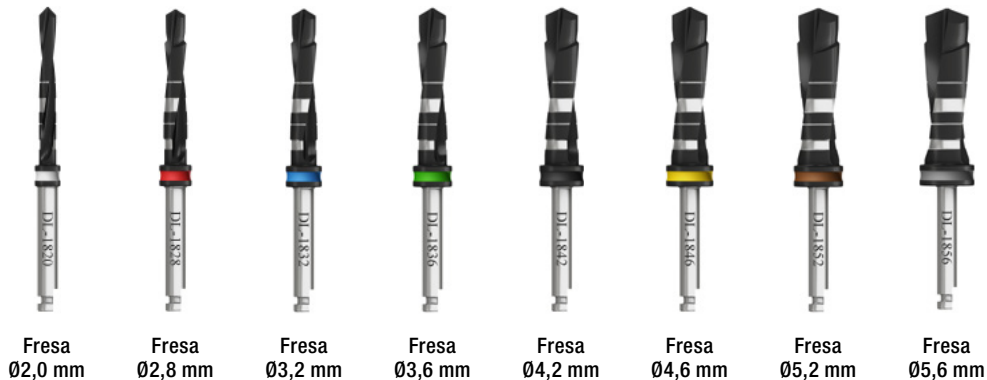

## Fresado en huesos Tipo IV (blando)

	Ø2,0 mm	Ø2,8 mm	Ø3,2 mm	Ø3,6 mm	Ø4,2 mm	Ø4,6 mm	Ø5,2 mm	Ø5,6 mm
Ø 3,5 / 3,75 mm	•	•	•					
Ø 4,2 mm	•	•	•	•				
Ø 5,0 mm	•	•	•	•	•			
Ø 6,0 mm	•	•	•	•	•	•	•	

## En huesos Tipo II y III (moderado y denso)

	Ø2,0 mm	Ø2,8 mm	Ø3,2 mm	Ø3,6 mm	Ø4,2 mm	Ø4,6 mm	Ø5,2 mm	Ø5,6 mm
Ø 3,5 mm	•	•	•					
Ø 3,75 mm	•	•	•					
Ø 4,2 mm	•	•	•	•				
Ø 5,0 mm	•	•	•	•	•	•		
Ø 6,0 mm	•	•	•	•	•	•	•	•

## En huesos Tipo I (muy denso)

	Ø2,0 mm	Ø2,8 mm	Ø3,2 mm	Ø3,6 mm	Ø4,2 mm	Ø4,6 mm	Ø5,2 mm	Ø5,6 mm
Ø 3,5 mm	•	•	•					
Ø 3,75 mm	•	•	•	•				
Ø 4,2 mm	•	•	•	•	•			
Ø 5,0 mm	•	•	•	•	•	•		
Ø 6,0 mm	•	•	•	•	•	•	•	•

Nota: solo en zona cortical

Nota: en huesos muy densos podría requerir pasar más de una vez la fresa indicada o bien insinuar la punta de la siguiente fresa en la secuencia. Por su diseño de dos etapas, las fresas de Adin incorporan función avellanadora.

